



**. . . für mehr Lebensqualität!**

**Ihr Fachhändler:**



Das Produkt ist in der Schweiz und anderen Ländern zum Patent angemeldet.

**Online-Shop:** [www.sukela.ch](http://www.sukela.ch)

**Herstellung / Verkauf**

Susanne Riedi-Joks  
Seefeldstrasse 12  
CH-6006 Luzern

Tel. +41 (0)41 370 61 38  
Fax +41 (0)41 370 61 38  
Email: susanne.riedi@ideecom.ch

**Distribution**

ideecom  
Günter Riedi  
Bahnweg 23  
CH-8493 Saland


Tel. +41 (0)52 386 37 34  
Fax +41 (0)52 386 37 36  
Email: g.riedi@ideecom.ch



**Tracheostomaschutz . . .**

mit integrierter Funktionstasche zur Aufnahme der Sprechhilfe-Vorrichtung

**. . . für mehr Lebensqualität!**

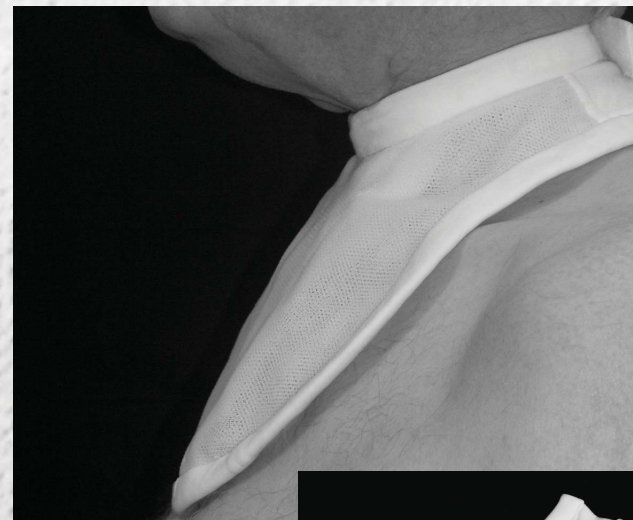

## Was ist „Sukela“



Die Neuentwicklung schützt einerseits die Öffnung am Hals, welche infolge der Kehlkopfoperation entsteht und andererseits dient die integrierte Funktionstasche zur Abdichtung und Aufnahme des Sprechhilfeventils.

„Sukela“ der kombinierte Tracheostomaschutz besteht aus:

- 1 x Tracheostomaschutz-Lätzchen
- 1 x Integrierte Funktionstasche
- 1 x Silikonring (Ventilhalterung)
- 1 x Sprechhilfeventil



## Funktionsweise

Die integrierte Funktionstasche ist bestückt mit einem Silikonring - der zur Aufnahme des Sprechhilfeventils dient. Die Funktionstasche wird mittels Klettverschluss an das Tracheostomaschutz-Lätzchen eingehängt und auf die Halsöffnung positioniert.

Durch Betätigung des Sprechhilfeventils wird das Tracheostoma verschlossen und ermöglicht das Sprechen.

Dank verwendeten Klettverschlüssen an Lätzchen und Funktionstasche, ist die Position des Sprechhilfeventils einfach anpassbar.

„Sukela“ ist angenehm zu Tragen und sieht aus wie ein T-Shirt.



## Erhältliche Ausführungen

- **Weiss, durchbrochen**  
Einfassung und Funktionstasche, weiss, aus 100% Baumwolle. Mehrschichtige, weisse Tüll-Lagen aus 100% Polyamid.  
**Art.Nr.: 9001**
- **Weiss, kompakt**  
Einfassung, Frontseite sowie Funktionstasche, weiss, aus 100% Baumwolle. Mehrschichtige, weisse Tüll-Lagen aus 100% Polyamid.  
**Art.Nr.: 9002**



## Vorteile

- keine hautirritierenden Klebstoffe
- ausgehustetes Sekret kann auf einfache Weise diskret entfernt werden
- angenehm zu tragen
- waschbar, Maschinen- oder Handwäsche (bei 60°C)
- bei richtiger Pflege lange verwendbar

